

# 新型コロナウイルス抗原定性検査の手順

ロシュ・ダイアグノスティックス(株) SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト

## 検査手順

下記の手順をよく読み、正しくご使用ください

検査の手順の動画をこちらでご覧いただけます。読み込めない場合は下記URLに直接アクセスしてください。

[https://dianews.roche.com/antigen\\_at\\_pharma.html](https://dianews.roche.com/antigen_at_pharma.html)



### 1

#### 検査キットの内容確認

以下の内容物が揃っていることを確認してください。

##### ◎内容物

- ①テストデバイス
- ②綿棒
- ③抽出用バッファチューブ
- ④ろ過フィルター
- ⑤ビニー(袋)



### 2

#### 検査準備

綿棒を袋から取り出します。

袋から取り出す際に、綿棒の先には絶対に手を触れないよう注意してください。



### 3

#### 検体採取 (必ず、鼻腔検体を採取してください)

鼻の中から検体を採取します。

鼻腔めぐり液採取

- ① キット付属の綿棒を鼻腔入り口から2cm程度、粘膜部分をめぐるようにしてゆっくり挿入します。
- ② 挿入後、綿棒を5回程度ゆっくり回転させます。
- ③ 挿入している部位で5秒程度静置し、綿球を十分湿らせた後、先端が他の部位に触れないようにそっと引き抜きます。
- ④ 採取した綿棒を所定の容器へ入れます。




※採取の際にくしゃみが出る可能性がありますので、周囲の飛び散りに注意してください。  
※多量の出血や過度の鼻汁の付着は避けてください。

### 4

#### 試料調製

採取した検体を抽出します。

- A. 抽出用バッファチューブの蓋シールを開け、**3**の綿棒を入れて10回以上もみほぐします。
- B. 検体を絞りだすように、チューブから綿棒を引き抜きます。
- C. チューブにろ過フィルターをしっかりと差し込みます。

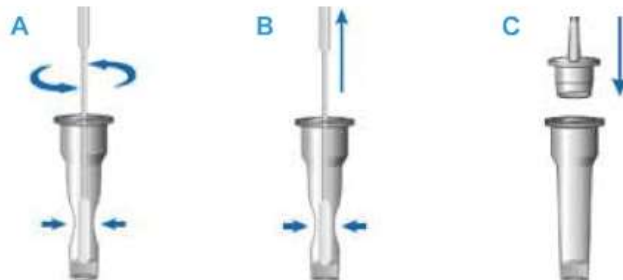

### 5

#### 検体滴下

テストデバイスを袋から取り出し、検体滴下孔へチューブから検体をゆっくり3滴垂らします。

※真上から滴下してください。  
※検体量不足にならないよう、ゆっくり3滴垂らしてください。



テストデバイスは水平を保ったまま、15分間お待ちください。

15分

#### 検査判定

**5**の約15分後に検査結果が判明します。

検査結果の見方は、裏面を参照してください。

滴下後30分以上たつと、時間の経過により結果が変わる場合がありますが、結果はあくまで結果判定時のものになりますのでご注意ください。

# 検査結果の判定方法

上

下

検体を滴下する場所

SARS-CoV-2 Rapid Ag

コントロールライン

測定が正しく行われたことを示す

テストライン

SARS-CoV-2 抗原

| コントロールライン                                         | あり                                                         | あり                         | あり | なし |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| テストライン                                            | あり                                                         | なし                         | なし | なし |
|                                                   |                                                            |                            |    |    |
| <b>陽性</b>                                         | <b>陰性</b>                                                  | <b>無効</b>                  |    |    |
|                                                   |                                                            |                            |    |    |
| SARS-CoV-2 抗原が陽性であり、感染性を持っていることを示します。             | SARS-CoV-2 抗原は検出されませんでした。                                  | コントロールラインが出てこない場合、測定は無効です。 |    |    |
| ※ただし、この時点では感染者として確定したわけではありません。お早めに医療機関を受診してください。 | ※検査結果が陰性の場合でも、感染の可能性がゼロではありません。症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。 |                            |    |    |

※判定は、検体の滴下後、**15分~30分**の範囲内で行ってください。**30分を経過すると、結果が変わることがあります。**

## 使用した抗原検査キットを捨てるときの注意点

ビニール袋を**二重**にして、しっかりと封をし、**4日間経過後**に、**燃えるごみ**（可燃ごみ）として出してください。