

新型コロナウイルス抗原定性検査の手順

ロシュ・ダイアグノスティックス(株) SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト

検査の手順の動画をこちらでご覧いただけます。読み込めない場合は下記 URL に直接アクセスしてください。

https://dianews.roche.com/antigen_at_pharma.html



検査手順

下記の手順をよく読み、正しくご使用ください

1 検査キットの内容確認

以下の内容物が揃っていることを確認してください。

◎内容物

- ①テストデバイス
- ②綿棒
- ③抽出用バッファチューブ
- ④ろ過フィルター



2 検査準備

綿棒を袋から取り出します。

袋から取り出す際には、綿棒の先には絶対に手を触れないよう注意してください。



3 検体採取 (必ず、鼻腔検体を採取してください)

鼻の中から検体を採取します。

鼻腔ぬぐい液採取

- ①キット付属の綿棒を鼻腔入り口から2cm程度、粘膜部分をぬぐうようにしてゆっくり挿入します。
- ②挿入後、綿棒を5回程度ゆっくり回転させます。
- ③挿入している部位で5秒程度静置し、綿球を十分湿らせた後、先端が他の部位に触れないようにそっと引き抜きます。
- ④採取した綿棒を所定の容器へ入れます。




※採取の際にくしゃみが出る可能性がありますので、周囲の飛び散りにご注意ください。
※多量の出血や過度の鼻汁の付着は避けてください。

4 試料調製

採取した検体を抽出します。

- A. 抽出用バッファチューブの蓋シールを開け、**3**の綿棒を入れて10回以上もみほぐします。
- B. 検体を絞りだすように、チューブから綿棒を引き抜きます。
- C. チューブにろ過フィルターをしっかりと差し込みます。

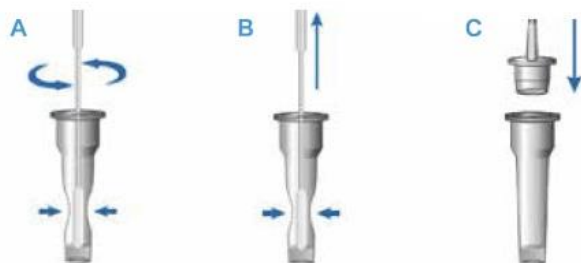

5 検体滴下

テストデバイスを袋から取り出し、検体滴下孔へチューブから検体をゆっくり**3滴**垂らします。

※真上から滴下してください。
※検体量不足にならないよう、ゆっくり3滴垂らしてください。



テストデバイスは水平を保ったまま、15分間お待ちください。

15分

検査判定

5の約15分後に検査結果が判明します。

検査結果の見方は、裏面を参照してください。

検査結果の判定方法

The diagram shows a SARS-CoV-2 Rapid Ag test kit with a sample well at the bottom and two test lines (C and T) above. A blue arrow points to the control line (C) and a red arrow points to the test line (T). A box indicates the sample drop location. Below the kit, three result scenarios are shown: 1. Positive: Both C and T lines are present. 2. Negative: Only the C line is present. 3. Invalid: No lines are present.

上

SARS-CoV-2 Rapid Ag

コントロールライン

測定が正しく行われたことを示す

テストライン

SARS-CoV-2 抗原

検体を滴下する場所

下

| コントロールライン | テストライン | 判定 |
|-----------|--------|----|
| あり | あり | 陽性 |
| あり | なし | 陰性 |
| なし | なし | 無効 |

コントロールライン あり
テストライン あり

コントロールライン あり
テストライン なし

コントロールライン なし

陽性

陰性

無効

SARS-CoV-2 抗原が陽性であり、感染性を持っていることを示します。

※ただし、この時点では感染者として確定したわけではありません。お早めに医療機関を受診してください。

SARS-CoV-2 抗原は検出されませんでした。

※検査結果が陰性の場合でも、感染の可能性がゼロではありません。症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

コントロールラインが出てこない場合、測定は無効です。

※判定は、検体の滴下後、**15分~30分**の範囲内で行ってください。**30分を経過すると、結果が変わることがあります。**

使用した抗原検査キットを捨てるときの注意点

ビニール袋を**二重**にして、しっかりと封をし、**4日間経過後**に、**燃えるごみ**（可燃ごみ）として出してください。